

spectra Optia® 始業点検リスト

実施日 年 月 日 () 記録担当者

■装置本体始業点検（遠心型血液成分分離装置 スペクトラ オプティア）

外観検査	電源コード、プラグ、差込口の破損または摩耗がない	正	否
	スイッチの緩みがない	正	否
	フィルターおよび遠心分離器チャンバーに構造上の損傷がない	正	否
	遠心分離器チャンバー内部やフィルターに、液体や異物がない	正	否
	遠心分離器のフィルターラッチが下がっており、フィルターが遠心分離器に正しい位置に固定されている	正	否
	カセットまたはトレイの背後に、取り付けの妨げになるものがない	正	否
	シーラーヘッドとケーブルが接続されている	正	否
	シーラーヘッドへの水分や異物の付着がない	正	否
設置確認	システムから 30 cm 離れた安全領域が確保され、そこに危険物が置かれていない	正	否
フィルター確認	用途に応じたフィルターがセットされている (CMNC：フィルタータイプII BMP：フィルタータイプI)	正	否
電源投入	システムが、障害なく一連の自己診断テストを実行している	正	否
	自己診断完了後に、画面上のボタンが有効となっている	正	否
総合判定			合 否

■ディスポーザブル回路点検（スペクトラ オプティア用血液回路）

開封前検査	用途に応じた血液回路を準備している	正	否
	パッケージに損傷がない	正	否
	ロット番号と有効期限を確認する（*下記記入）	正	否
開封後検査	チューブの明らかなひどい折れがない	正	否
	チューブセットの破損がない	正	否
	ライン上のクランプがすべて開いている	正	否
	採血針が取り付けられている	正	否
	エンドキャップが取り付けられている	正	否
総合判定			合 否

* ディスポーザブル回路、溶液 ロット番号・有効期限記入欄

IDL セット	ロット番号：	有効期限：
BMPセット	ロット番号：	有効期限：
ACD-A溶液	ロット番号：	有効期限：
	ロット番号：	有効期限：
生理食塩水	ロット番号：	有効期限：